

NARHINEL CONFORT ASPIRADOR RECAMBIO (10 BLANDO DESECHABLE)



NARHINEL CONFORT ASPIRADOR RECAMBIO (10 BLANDO DESECHABLE)

Calificación: Sin calificación

Precio

4,95 €

4,95 €

0,86 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [NARHINEL](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Eliminación de las secreciones nasales del bebé.

MODO DE EMPLEO

Colocar el recambio (A) en el cuerpo central del aparato (B). Colocar la boquilla de aspiración (C) en tu boca y el extremo del recambio justo en la entrada de uno de los orificios nasales del bebé. Aspirar suavemente, poco a poco y de forma regular, por la boquilla de aspiración (C). Si es necesario, entre la aspiración de los dos orificios, retirar las secreciones nasales mediante un pañuelo soplando por la boquilla de aspiración. Repetir la operación en el otro orificio nasal con el mismo recambio (A). Quitar el recambio (A) sucio y desecharlo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.